

1



Herstellerhinweise beachten. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

2



Nach Gebrauch Inhaliergerät vom Stromnetz trennen.

3



2 %ige D 10-Gebrauchslösung in Behälter ansetzen.

4



Verneblerteile (Medikamentenbecher und -düse, Verneblerhaube, Kamin, Inhaliermaske und Mundstück) abnehmen bzw. abschrauben.

5



Verneblerteile in D 10-Gebrauchslösung vollständig einlegen. Einwirkzeit genau beachten.

6



Vernebler-Handstück und Gehäuse des Geräts keinesfalls in Flüssigkeit einlegen. Äußerlich wischdesinfizieren. Einwirken lassen.

7



Eingelegte und desinfizierte Teile gründlich mit Trinkwasser spülen, erst nach Trocknung montieren und trocken lagern.

D 10 Absauggerätedesinfektion - Auch für Inhaliergeräte



B 15 Desinfektionstücher für die Wischdesinfektion des Gerätes. Anwendungsvideo: Inhaliergerätedesinfektion

Erstellt in www.hygiesystem.de.

| | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| Einrichtung: | Die richtige Vorgehensweise: | Inhaliergerätedesinfektion | |
| Ersteller: | Prüfung: | Freigabe: | Evaluation am: |
| Datum: 15.01.2020 | Datum: | Datum: | Datum: |