

1



Применять препараты для дезинфекции инструментов занесенные в реестр VAH.

2




Соблюдать инструкции производителя. Во время работы носить соответствующие защитные перчатки, -очки и одежду.

3



Точная дозировка благодаря флакону- дозаторы и плану дозировки.

4

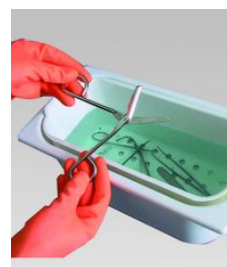

После использования и при необходимости удалить с инструментов салфеткой грубые органические загрязнения. Погрузить инструменты для очистки и дезинфекции напр. в препарат А 20. Полностью погрузить их в разобранном и раскрытом виде в раствор.

5



Соблюдать время экспозиции производителя.

6



Тщательно промыть инструменты водой и просушить. Проверить на чистоту и повреждение. При необходимости автоклавировать.

7



При возможном остаточном загрязнении инструментов повторно очистить их щеткой. При этом этапы 4 - 6 повторить.

**Препарат А 20 для дезинфекции инструментов универсального использования и быстроактивный**



Соблюдать: Перед обработкой инструментов необходимо каждый раз учитывать согласно RKI категории фактора риска.

[www.hygiensystem.de](http://www.hygiensystem.de)