

<p><b>Manuelle Aufbereitung</b></p> 	<p><b>Schritt 1:</b> Hände desinfizieren und Handschuhe anziehen.</p>		<p><b>Schritt 2:</b> Vor Wiederbefüllung bzw. Produktwechsel Spenderbox auf Unversehrtheit prüfen (sonst austauschen). Vlies- und Flüssigkeitsreste aus Spenderbox sowie Etikett auf dem Deckel entfernen.</p>
	<p><b>Schritt 3:</b> Verschmutzungen mechanisch entfernen. Spenderbox inkl. Deckel innen und außen mit heißem Leitungswasser (&gt; 55° C, Achtung: Verbrühungsgefahr!) gründlich abspülen.</p>		<p><b>Schritt 4:</b> Mit Einmaltuch trocknen.</p>
	<p><b>Schritt 5:</b> Spenderbox und Deckel mit Einmaltuch, getränkt mit alkoholischer Schnelldesinfektion, vollständig benetzen und gründlich desinfizieren (Einwirkzeit beachten!).</p>	<p><b>Alternativ</b></p> 	<p><b>Maschinelle Aufbereitung:</b> Im Reinigungs- und Desinfektionsgerät bei bis zu 93° C chemothermisch aufbereiten und trocknen.</p>
	<p><b>Schritt 6:</b> Neue Tuchrolle in die gereinigte und vollständig getrocknete Spenderbox geben. Dabei Folie entfernen.</p>		<p><b>Schritt 7:</b> Neue Tuchrolle mit ausreichender Menge Desinfektionslösung (siehe Produktinformation) mit gleichmäßigen kreisenden Bewegungen tränken.</p>
	<p><b>Schritt 8:</b> Tuch einfädeln.</p>		<p><b>Schritt 9:</b> Deckel dicht verschließen (Tuch darf nicht herausragen) und mit neu beschriftetem Etikett versehen.</p>
	<p><b>Schritt 10:</b> Wartezeit (30 - 60 Min.) einhalten.</p>	<p><b>oro® Vliestücher</b></p> 	<p><b>standard und kompakt</b> Zum Selbertränken, z. B. mit Gebrauchslösungen B 5, B 10, B 15 und B 20 Wischdesinfektion und den gebrauchsfertigen orochemie-Produkte B 33, B 40 und B 45 Schnelldesinfektion.</p>

**Bitte beachten: Tuchspendersysteme stichprobenartig im Rahmen von Monitoring-Untersuchungen auf Erregerkontamination hin überprüfen. Kontaminierte Spenderboxen nicht aufbereiten sondern entsorgen.**

Erstellt in [www.hygiesystem.de](http://www.hygiesystem.de)

Einrichtung:	Aufbereitung und Wiederbefüllung	von Tuchspendersystemen	
Ersteller:	Prüfung:	Freigabe:	Evaluation am:
Datum: 19.03.2019	Datum:	Datum:	Datum: