

**Schritt 1**



Leere Flasche dem Spender entnehmen, Produktreste vom Pumpensteigrohr mit sauberem Einmaltuch abwischen.

**Schritt 2**



Pumpe entfernen, mit Bürste unter fließendem heißem Wasser reinigen. Steigrohr von unten nach oben mit heißem Wasser durchspülen. Mit Einmaltuch trocknen.

**Schritt 3**



Spendergehäuse, v. a. Nischen und Vertiefungen, unter fließendem heißem Wasser mit Bürste reinigen, trocknen.

**Schritt 4**



Spenderrückwand mit feuchtem Einmaltuch reinigen. Alle Spenderteile äußerlich wischdesinfizieren. Einwirkzeit beachten.

**Schritt 5**



Spender zusammensetzen, mit alkoholischer Schnelldesinfektion mehrmals (bis zu 20 Mal) durchpumpen, im Messbecher auffangen und entsorgen. Einwirkzeit beachten.

**Schritt 6**



Neue Produktflasche in Spender einsetzen. Das darin enthaltene Präparat mehrmals durchpumpen. Ebenfalls im Messbecher auffangen und entsorgen. Fertig!

Erstellt in [www.hygienesystem.de](http://www.hygienesystem.de)

Einrichtung:	Vorschlag zur Aufbereitung geeigneter Spender für Händehygienepräparate	
Ersteller:	Prüfung:	Freigabe:
Datum: 08.02.2019	Datum:	Datum:
		Evaluation am:
		Datum: