

1



VAH-gelistetes Instrumentendesinfektionsmittel verwenden.

2




Herstellerhinweise beachten. Geeignete Schutzhandschuhe und -brille tragen.

3



Genau dosieren mittels Dosierhilfen und Dosiertabellen.

4

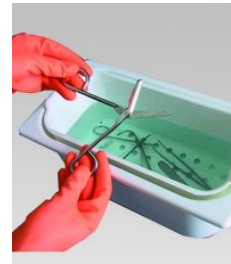

Verschmutzungen entfernen. Instrumente ggf. öffnen, in Einzelteile zerlegen. Komplett, luftblasenfrei in Desinfektionslösung eintauchen. Hohlräume durchspülen.

5



Vom Hersteller angegebene Stand- und Einwirkzeiten genau beachten.

6



Instrumente gründlich mit Trinkwasser spülen und trocknen. Auf Sauberkeit und Unversehrtheit überprüfen. Bei Bedarf sterilisieren.

7



Bei Restverschmutzungen Instrumente nochmals mit Bürste reinigen. Danach Wiederholung von 4 - 6.

A 20 Instrumentendesinfektion - Vielseitig & schnell wirksam



Anwendungsvideo: Instrumentendesinfektion. Bitte beachten: Vorab Risikobewertung und Einstufung nach RKI durchführen.

Erstellt in www.hygiensystem.de.

Einrichtung:	Instrumentendesinfektion		
Ersteller:	Prüfung:	Freigabe:	Evaluation am:
Datum: 16.01.2020	Datum:	Datum:	Datum: