

1



Herstellerhinweise beachten. Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

2



Vor Gebrauch max. 20 ml Konzentrat D 10 im Auffangbehälter des Absauggeräts vorlegen (optional).

3



Zusätzlich 2 %ige D 10-Gebrauchslösung in einem separaten Behälter ansetzen.

4



Nach jeder Anwendung Absaugkanüle entsorgen; 200 ml D 10-Gebrauchslösung durch den Schlauch saugen.

5



Absauggerät vom Stromnetz trennen, äußerlich wischdesinfizieren. Einwirken lassen.

6



1 x täglich kontaminierte Teile (Behälter, Schläuche etc.) vollständig bedeckt in D 10-Gebrauchslösung einlegen. (Achtung: Keine Filter!) Angegebene Einwirkzeit beachten.

7



Eingelegte, desinfizierte Teile gründlich mit Trinkwasser spülen, erst nach Trocknung montieren und trocken lagern.

**D 10 Absauggerätedesinfektion - Auch für Inhaliergeräte**



B 45 Desinfektionstücher für die Wischdesinfektion des Gerätes. Anwendungsvideo: Absauggerätedesinfektion

Erstellt in [www.hygiensystem.de](http://www.hygiensystem.de).

Einrichtung:	Die richtige Vorgehensweise:	Absauggerätedesinfektion	
Ersteller:	Prüfung:	Freigabe:	Evaluation am:
Datum: 18.11.2022	Datum:	Datum:	Datum: