

1



Соблюдать инструкцию производителя. Во время работы носить пригодные перчатки и очки.

2



Перед использованием залить в емкость аспирационного аппарата от 10 до макс. 20 мл концентрата (по желанию).

3



Дополнительно подготовить в отдельной емкости 2 %-ый готовый препарат D 10. 20 мл концентрата из флакона-дозатора на 1 литр воды.

4



После каждого применения аппарата утилизировать аспирационная канюля; сосать через шланг 200 мл готового препарата D 10.

5



Отключить от сети аспирационный аппарат. Наружные поверхности аппарата обработать готовым препаратом D 10. Дать воздействовать. Альтернативно могут быть использованы дезинфицирующие салфетки В 15.

6



1 x ежедневно полностью погружать загрязненные части (емкость, шланги и т.д.) в готовый препарат D 10. (Внимание: не погружать фильтры) Соблюдать время экспозиции.

7



После окончания времени экспозиции погруженные, продезинфицированные части промыть водой. Сборка производится после полного высыхания частей, хранить в хорошо проветриваемом месте.



Дезинфицирующие салфетки В 45 для дезинфекции устройства протиркой. Видео по применению: дезинфекция аспирационного аппарата