


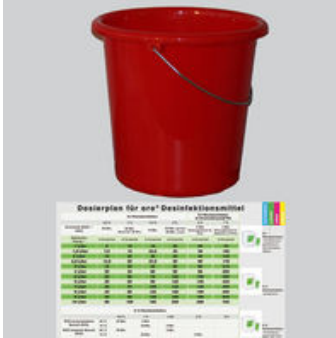

	<p>Schritt 1</p> <p>Genaue Dosierangaben dem Dosierplan entnehmen.</p>		<p>Schritt 2</p> <p>Gewünschten Behälter (z. B. Eimer, Instrumentenwanne) mit klarem, kaltem Wasser bis zu ca. 2/3 der gewünschten Gesamtmenge auffüllen (siehe Dosierplan). Markieren Sie vorher an dem Gefäß die benötigte Gesamtmenge der gebrauchsfertigen Lösung. _____ Liter</p>
	<p>Schritt 3</p> <p>Dosierkopf auf 1 l Flasche Desinfektionsmittel-Konzentrat schrauben.</p>		<p>Schritt 4</p> <p>Deckel leicht öffnen, damit Luft entweichen kann. Durch Drücken der Flasche den Dosierkopf bis zur gewünschten Markierung füllen.</p>
	<p>Schritt 5</p> <p>_____ Dosierkopffüllungen in den Eimer geben. Dafür den 4. Schritt _____ mal wiederholen (siehe Dosierplan). Füllen Sie das Gefäß bis zur gewünschten Gesamtmenge mit kaltem Wasser auf. Gut umrühren! Gebrauchslösung: _____ Liter Konzentrat: _____ ml</p>	 <p>Richtig dosieren - wirksam desinfizieren</p>	<p>orochemie- Anwendungsvideos</p> <p>Videos auch unter: www.orochemie.de</p>

Erstellt unter: www.hygienesystem.de

Einrichtung:	Dosieranleitung für Dosierkopf		
Ersteller:	Prüfung:	Freigabe:	Evaluation am:
Datum: 08.02.2019	Datum:	Datum:	Datum: