

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>Manuelle Aufbereitung</b></p>  | <p><b>Schritt 1:</b><br/>Hände desinfizieren und Handschuhe anziehen.</p>  |                                   | <p><b>Schritt 2:</b><br/>Vor Wiederbefüllung bzw. Produktwechsel Spenderbox auf Unversehrtheit prüfen (sonst austauschen). Vlies- und Flüssigkeitsreste aus Spenderbox sowie Etikett auf dem Deckel entfernen.</p>     |
|                                      | <p><b>Schritt 3:</b><br/>Verschmutzungen mechanisch entfernen. Spenderbox inkl. Deckel innen und außen mit heißem Leitungswasser (&gt; 55° C, Achtung: Verbrühungsgefahr!) gründlich abspülen.</p> |                                   | <p><b>Schritt 4:</b><br/>Mit Einmaltuch trocknen.</p>  |
|                                      | <p><b>Schritt 5:</b><br/>Spenderbox und Deckel mit Einmaltuch, getränkt mit alkoholischer Schnelldesinfektion, vollständig benetzen und gründlich desinfizieren (Einwirkzeit beachten!).</p>       | <p><b>Alternativ</b></p>          | <p><b>Maschinelle Aufbereitung:</b><br/>Im Reinigungs- und Desinfektionsgerät bei bis zu 93° C chemothermisch aufbereiten und trocknen.</p>  |
|                                    | <p><b>Schritt 6:</b><br/>Neue Tuchrolle in die gereinigte und vollständig getrocknete Spenderbox geben. Dabei Folie entfernen.</p>   |                                 | <p><b>Schritt 7:</b><br/>Neue Tuchrolle mit ausreichender Menge Desinfektionslösung (siehe Produktinformation) mit gleichmäßigen kreisenden Bewegungen tränken.</p>  |
|                                    | <p><b>Schritt 8:</b><br/>Tuch einfädeln.</p>   |                                 | <p><b>Schritt 9:</b><br/>Deckel dicht verschließen (Tuch darf nicht herausragen) und mit neu beschriftetem Etikett versehen.</p>   |
|                                    | <p><b>Schritt 10:</b><br/>Wartezeit (30 - 60 Min.) einhalten.</p>  | <p><b>oro® Vliestücher</b></p>  | <p><b>standard und kompakt</b><br/>Zum Selbertränken, z. B. mit Gebrauchslösungen B 5, B 10, B 15 und B 20 Wischdesinfektion und den gebrauchsfertigen orochemie-Produkte B 33, B 40 und B 45 Schnelldesinfektion.</p> |

**Bitte beachten: Tuchspendersysteme stichprobenartig im Rahmen von Monitoring-Untersuchungen auf Erregerkontamination hin überprüfen. Kontaminierte Spenderboxen nicht aufbereiten sondern entsorgen.**

Erstellt in [www.hygiensystem.de](http://www.hygiensystem.de)

|                   |                                  |                         |                |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Einrichtung:      | Aufbereitung und Wiederbefüllung | von Tuchspendersystemen |                |
| Ersteller:        | Prüfung:                         | Freigabe:               | Evaluation am: |
| Datum: 19.03.2019 | Datum:                           | Datum:                  | Datum:         |